


オムニリーダーコントロールパネル

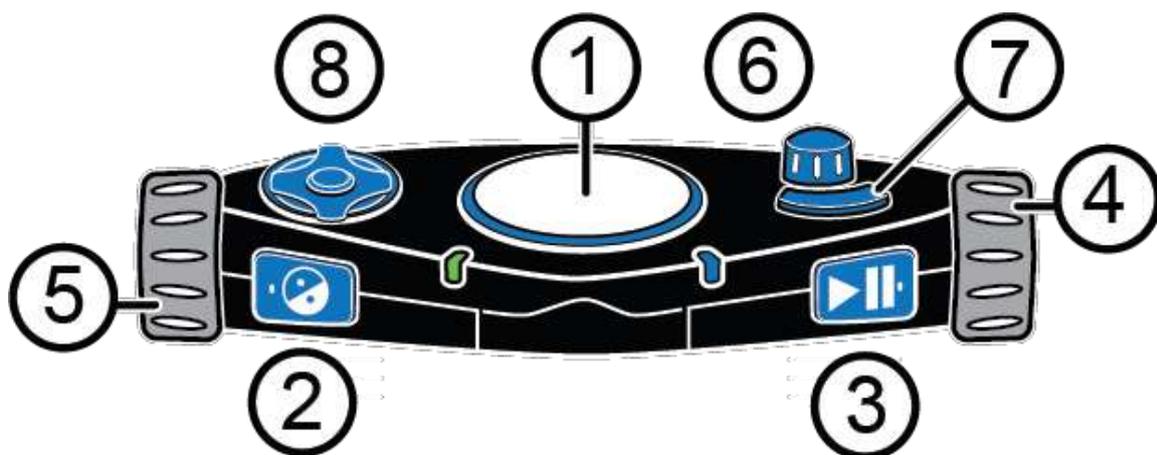

<p>① 読み取りボタン</p> 	<p>押すと文書の読み取りを行い、読み上げを開始します。</p>					
<p>② コントラストボタン</p> 	<p>メニュー操作の際に押すと、1つ前のメニュー(または画面)に戻ります。</p> <table border="1" data-bbox="576 931 1495 1093"> <tr> <td data-bbox="576 931 1023 1093"> <p>【ロービジョンモード時】 文書または本の読み上げ中に押すとカラーモードが切り替わります。</p> </td> <td data-bbox="1027 931 1495 1093"> <p>【ブラインドモード時】 文書または本の読み上げ中に押すと、読み上げ音声切り替わります。</p> </td> </tr> </table>		<p>【ロービジョンモード時】 文書または本の読み上げ中に押すとカラーモードが切り替わります。</p>	<p>【ブラインドモード時】 文書または本の読み上げ中に押すと、読み上げ音声切り替わります。</p>		
<p>【ロービジョンモード時】 文書または本の読み上げ中に押すとカラーモードが切り替わります。</p>	<p>【ブラインドモード時】 文書または本の読み上げ中に押すと、読み上げ音声切り替わります。</p>					
<p>③ 再生ボタン</p> 	<p>メニュー操作の際に押すと、先のメニューに進み項目の選択ができます。 文書読み上げの際は、押すと再生または一時停止ができます。</p>					
<p>④ 右ダイヤル</p>	<p>ダイヤルを回すとメニュー項目や文書内の表示を上下にスクロールできます。</p>					
<p>⑤ 左ダイヤル</p>	<table border="1" data-bbox="576 1341 1495 1503"> <tr> <td data-bbox="576 1341 1023 1503"> <p>【ロービジョンモード時】 文書の読み上げ中またはカメラビュー時に回すと画面拡大表示の倍率を変更できます。</p> </td> <td data-bbox="1027 1341 1495 1503"> <p>【ブラインドモード時】 文書の読み上げ中に回すと読み上げ速度を変更できます。</p> </td> </tr> </table>		<p>【ロービジョンモード時】 文書の読み上げ中またはカメラビュー時に回すと画面拡大表示の倍率を変更できます。</p>	<p>【ブラインドモード時】 文書の読み上げ中に回すと読み上げ速度を変更できます。</p>		
<p>【ロービジョンモード時】 文書の読み上げ中またはカメラビュー時に回すと画面拡大表示の倍率を変更できます。</p>	<p>【ブラインドモード時】 文書の読み上げ中に回すと読み上げ速度を変更できます。</p>					
<p>⑥ ボリュームダイヤル /メニューボタン</p> 	<p>ダイヤルとして回すとボリュームを変更できます。</p> <p>ボタンとして押すとメインメニューを開きます</p>					
<p>⑦ モードボタン</p> 	<p>メニュー画面または文書からカメラビューモードへ切り替えます。</p>					
<p>⑧ 中央ボタンと十字ボタン</p> 	<table border="1" data-bbox="576 1856 1495 2116"> <tr> <td data-bbox="576 1856 1023 1973"> <p>【中央ボタン・文書ビュー時】 バッテリー情報を読み上げます。</p> </td> <td data-bbox="1027 1856 1495 1973"> <p>【中央ボタン・カメラビュー時】 LED ライトのオン・オフを切り替えます。</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="576 1980 1495 2116"> <p>【十字ボタン】 文書読み上げ時、上下でページ移動、左右で単語移動。</p> </td> </tr> </table>		<p>【中央ボタン・文書ビュー時】 バッテリー情報を読み上げます。</p>	<p>【中央ボタン・カメラビュー時】 LED ライトのオン・オフを切り替えます。</p>	<p>【十字ボタン】 文書読み上げ時、上下でページ移動、左右で単語移動。</p>	
<p>【中央ボタン・文書ビュー時】 バッテリー情報を読み上げます。</p>	<p>【中央ボタン・カメラビュー時】 LED ライトのオン・オフを切り替えます。</p>					
<p>【十字ボタン】 文書読み上げ時、上下でページ移動、左右で単語移動。</p>						

オムニリーダー文書読み取り方法


① 本体を平らな場所に置き、画面を自分側に向けてください。




② 電源ボタンを押してオムニリーダーを起動してください。



③ メニューが表示されると起動完了です。読みたい文書(最大 A4サイズ)を本体前面に置いてください。

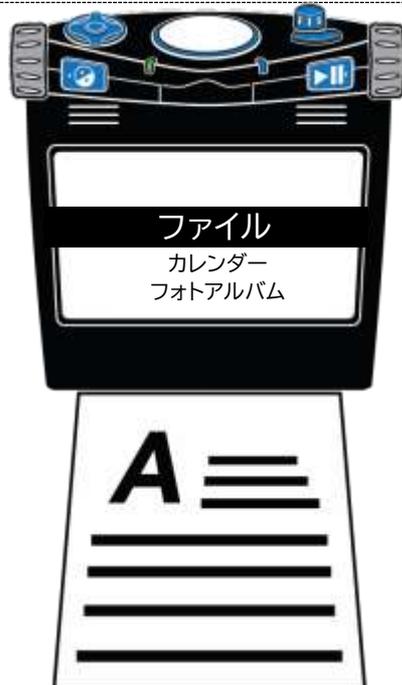

④ 本体上面中央の読み取りボタンを押してください。

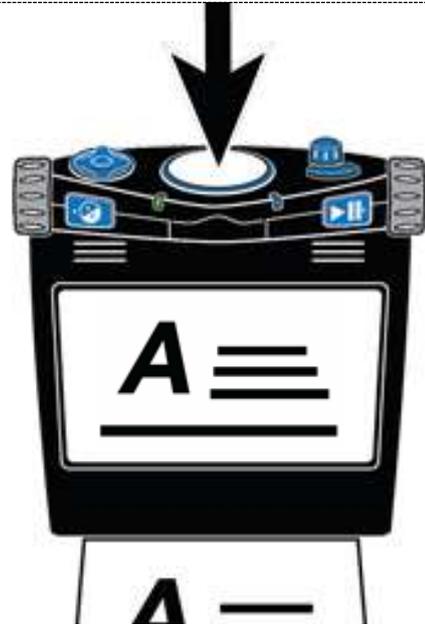

⑤ 読み取った文書を画面に表示し、音声で読み上げます。読み上げを中断したい場合は再生ボタンを押してください。

⑥ 次の文書を読みたい場合は読み上げを停止した状態で文書を差し替えて、再度読み取りボタンを押してください。